

# Kurzversion Wechselanleitung *stay•safe*<sup>®</sup>

- 1** Führen Sie die Desinfektion und Vorbereitung wie gewohnt durch.  
(Ausführliche Informationen finden Sie in der ausführlichen Wechselanleitung *stay•safe*<sup>®</sup>)



#### Aufbau:

- Legen Sie die DISC in den Organizer ein
- Die Desinfektionskappe in die linke Aufnahme des Organizers einlegen
- Die Katheterverlängerung in die rechte Aufnahme des Organizers einlegen
- Desinfizieren Sie erneut die Hände
- Schrauben Sie die Verschlusskappe der DISC ab und lassen Sie sie fallen




#### Verbindung zum neuen System herstellen:

- Schrauben Sie die Katheterverlängerung von der Desinfektionskappe ab und verbinden Sie diese mit der DISC
- Öffnen Sie die Schlauchklemme der Katheterverlängerung, sodass der Auslauf beginnen kann



#### „Flush“:

- Drehen Sie den Drehknopf der DISC bis zur Position „●●“ und zählen Sie dabei langsam bis 5 bevor Sie weiterdrehen
- Der Schlauch zwischen Lösungsbeutel und DISC muss vollständig mit Lösung gefüllt sein

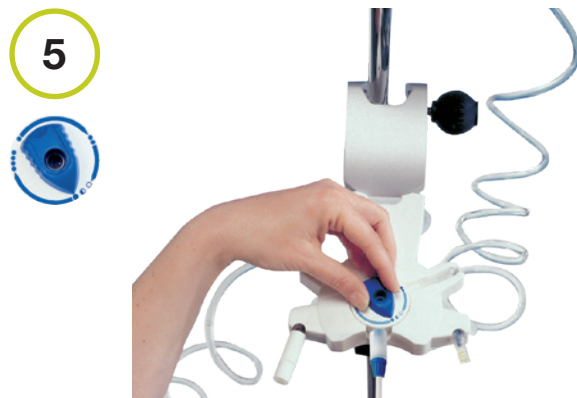

#### Dialysateinlauf:

- Drehen Sie den Drehknopf der DISC weiter zur Position „○●●“
- Die Punkte bedeuten:
  - kein Einlauf, Pause ohne Abbrechen der Behandlung
  - halbe Einlaufgeschwindigkeit
  - volle Einlaufgeschwindigkeit

# Kurzversion Wechselanleitung *stay•safe*®

6



## Sicherheitsverschluss mit PIN:

- Drehen Sie den Drehknopf der DISC bis zum Anschlag zur Position „●●●●●“
- Schließen Sie die Klemme an der Katheterverlängerung

7



## Entfernen der Schutzkappe:

- Entfernen Sie die Schutzkappe der Desinfektionskappe und schrauben Sie die Schutzkappe auf die rechte gebrauchte Desinfektionskappe

8



## Diskonnektion:

- Schrauben Sie die Katheterverlängerung von der DISC auf die neue Desinfektionskappe (links)

9



## Verschluss der DISC:

- Drehen Sie die benutzte Desinfektionskappe (rechts) auf das offene Ende der DISC

10

## Vergessen Sie nicht das Dialysat zu kontrollieren.

Die Entsorgung des Beutelsystems und die Vorbereitung des neuen Beutels können Sie in der ausführlichen Wechselanleitung nachlesen.



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland  
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Deutschland: Fresenius Medical Care GmbH · Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.  
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-8740 · E-mail: marketing.deutschland@fmc-ag.com

Österreich: Fresenius Medical Care Austria GmbH · Lundenberggasse 5 · 1210 Wien  
Telefon: +43 (0) 1-2923501 · Fax: +43 (0) 1-292350185 · E-mail: fmc.austria@fmc-ag.com

Schweiz: Fresenius Medical Care (Schweiz) AG · Aawasserstrasse 2 · 6370 Oberdorf NW  
Telefon: +41 (0) 41-6195050 · Fax: +41 (0) 41-6195080 · E-mail: info.ch@fmc-ag.com

www.FreseniusMedicalCare.de · www.fmc-austria.at · www.fresenius.ch